

Ďakujeme za výber senzora otelenia Moocall

My tu v Moocall sme hrdí na naše produkty a dúfame, že budete so svojim senzorom otelenia Moocall rovnako spokojní ako my.

Tešíme sa na mnoho bezpečných a úspešných telenie s vami!

Pokiaľ budete niekedy potrebovať našu pomoc, napíšte nám na help@moocall.com, chatujte s nami prostredníctvom nášho živého chatu na www.moocall.com.

S Pozdravom, Tím Moocall


Krok 1: Aktivujte svoj Moocall senzor otelenia

Aby ste mohli používať svoj nový senzor otelenia Moocall, musíte ho najskôr aktivovať online.

Navštívte www.moocall.com/register na dokončenie aktivácie.

Pokiaľ senzor nebol aktivovaný, vypne sa ihneď po zapnutí

Krok 2: Nastavenie gumovej vložky

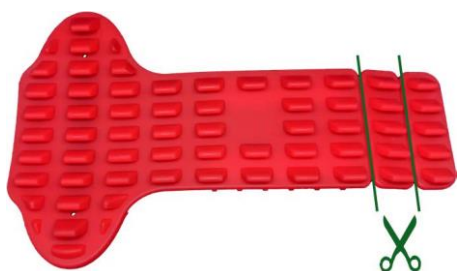

Gumovú vložku je možné narezať na veľkosti v závislosti od veľkosti chvostov kráv vo Vašom stáde. Pre tenké chvosty odrežte obe časti, pre stredné chvosty jednu časť a pre hrubé chvosty nestrihajte vôbec.

Krok 3: Nabíjanie

Ak chcete nabiť svoj snímač otelenia Moocall, odklopte gumovú vložku, aby ste odkryli západku nabíjacieho uzáveru, odstráňte nabíjaciú krytku a vložte nabíjací kábel podľa obrázku.

Po dokončení nabíjania vráťte nabíjací kryt späť a nasadte kryt späť na kryt nabíjacieho zariadenia.

DÔLEŽITÉ: Pred nasadením späť na snímač sa uistite, že je uzáver suchý, aby bolo zaistené správne vodotesné utesnenie.


NEZASUŇUJTE USB kábel do nabíjacieho portu senzora násilím.




Krok 4: Zapnutie senzora

Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo po dobu štyroch sekúnd.

Svetlo na senzore bude preblikávať farbami a potom sa každých 4-5 sekúnd rozsvieti na modro, čo znamená, že senzor je zapnutý a aktívny.

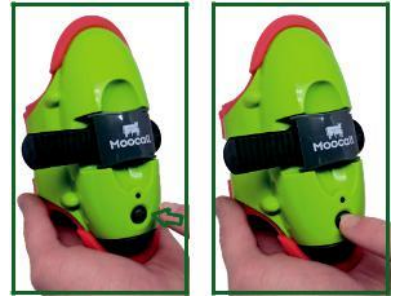

Pre vypnutie podržte tlačidlo po dobu desiatich sekúnd.

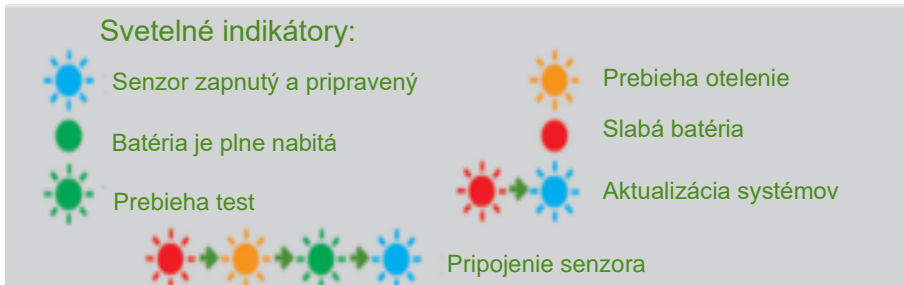

Senzor vás upozorní, keď úroveň nabitia batérie klesne pod 15 %.

Krok 5: Testovanie senzora

Vykonajte prosím tento test v oblasti, kde bude senzor používaný, aby bolo zaistené dostatočné pokrytie siete pre správnu funkciu senzora.

Ak sa senzor nikdy neustáli na modrom blikaní a sám sa vypne potom, čo niekoľko minút blikal viacerými farbami, musíte buď senzor aktivovať, alebo môžete mať vo vašej oblasti problém s pokrytím mobilnej siete.



Uistite sa, že je senzor zapnutý a modré svetlo bliká,

Stlačte tlačidlo pevne na pol sekundy,

uvoľnite a stlačte znovu tlačidlo ihneď,

senzor by mal začať blikáť na zeleno, čo naznačuje, že test prebieha.

Ak zelená kontrolka nezačne blikáť ani pri druhom stlačení, uistite sa, že máte pevný kontakt s tlačidlom, a skúste to znova.

Dostanete SMS na všetky čísla spojené so senzorom, e-mail a upozornenia prostredníctvom aplikácie Mocoall, ak ju máte nainštalovanú.

Tlačidlo stlačte iba prstom, nepoužívajte žiadne nástroje, mohlo by dôjsť k poškodeniu tlačidla a elektroniky vo vnútri.

Krok 6: Otvorenie spony

Zdvihnutím páky otvoríte kryt Moocall. Zatlačte páku úplne doľava, kým sa s cvaknutím neotvorí, aby sa popruh uvoľnil.



Krok 7: Umiestnenie senzora na chvost

1. Umiestnite senzor na chvost kravy blízko otelenia. Senzor by mal byť umiestnený na chvoste oproti vulve.



2) Vložte ozubený pás do mechanizmu.



3) Zatvorte mechanizmus a zaklapnite dvierka na miesto. Zatiahnite za voľný koniec ozubeného popruhu, pokiaľ nebude senzor pevne na chvoste kravy.



4) Zaistite, aby bol snímač na chvoste pevne usadený testovaním. Senzor by mal byť schopný sa pohybovať zo strany na stranu, ale nie dole na chvoste. Podľa potreby upravte utiahnutie popruhu, pokiaľ nebude dosiahnuté správne uchytenie.



DÔLEŽITÉ! NEUTAHUJTE PRÍLIŠ SILNE!

Pokiaľ bude senzor umiestnený na chvoste príliš tesne, dostanete falošné varovania a môžete spôsobiť trvalé, nevratné poškodenie kravy!

POZNÁMKA: Uistite sa, že vaša gumová vložka bola prispôbena veľkosti chvosta vašej kravy. Použitie gumených vložiek nesprávnej veľkosti môže viesť k nepohodliu pre zviera a falošným varovaniam zo senzora.


Krok 8: Kontrola usadenia na chvoste

Akonáhle je snímač otelenia Moocall umiestnený na chvoste, uistite sa, že gumená vložka neopúšťa chvost, ozubený remienok netrie o chvost alebo to, že samotná guma je nahromadená alebo prekryva plastové puzdro, aby sa vytvorili body zovretia.




SMS upozornenie Moocall


Toto sú SMS upozornenia, ktoré snímač otelenia Moocall odošle na váš telefón.

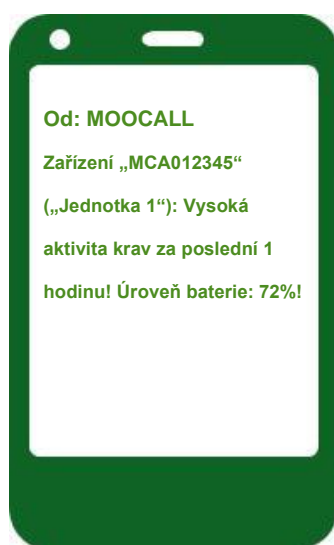


Prvé varovanie

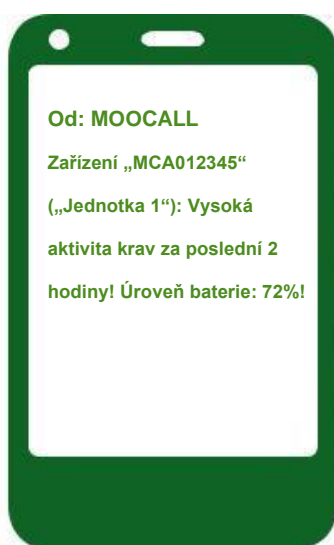


Druhé varovanie

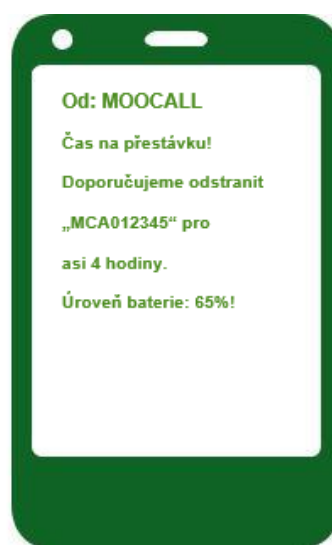


Upozornenie - prerušenie

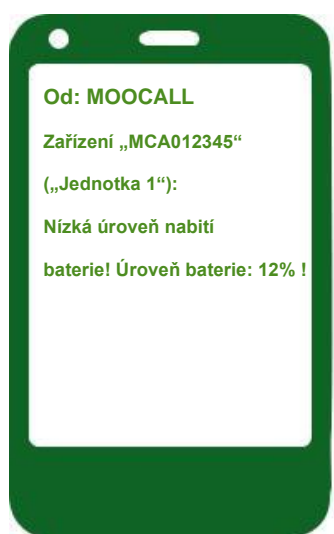

Upozornenie na batériu

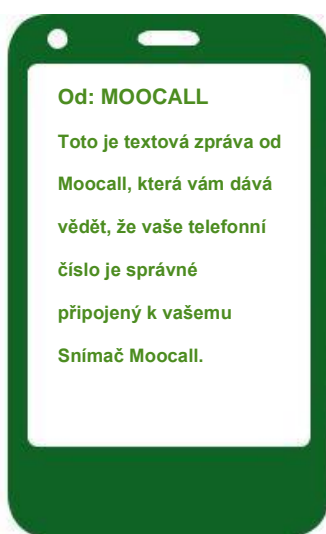

Test SMS

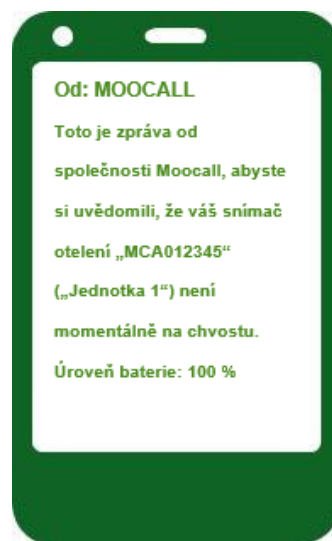

Mimo chvost

Aplikácia a webové rozhranie MyMoocall

Pri registrácii vášho senzora Moocall si zvolíte svoje používateľské meno a heslo pre webové rozhranie MyMoocall. V rozhraní môžete vidieť stav všetkých vašich senzorov na ľavej table a všetky upozornenia z nich odoslané na strednej table. Svoje telefónne čísla môžete spravovať v pravej table a e-mailové upozornenia, časové pásmo a jazykové nastavenia v rozbalovacej ponuke zo svojho používateľského mena vpravo hore.

Prístup k aplikácii MyMoocall cez www.mymoocall.com



Aplikácia Moocall Breedmanager je dostupná pre zariadenia Android a iOS. Vyhľadajte „Moocall“ vo svojom obchode s aplikáciami a nainštalujte. Prihláste sa do aplikácie pomocou rovnakého používateľského mena a hesla, aké používate pre prístup do webového rozhrania MyMoocall.

Aplikácia vám poskytuje prístup k rovnakým funkciám, ktoré máte prostredníctvom webového rozhrania MyMoocall, a oveľa viac: Nástroj pre správu stáda, upozornenie na vyzváňacie tóny, vďaka ktorým okrem textových správ zazvoní váš telefón, fóra otázok a odpovedí a ďalšie. A všetko sa deje cez WiFi, pokiaľ je mobilný signál okolo vás slabý alebo neprítomný, takže nikdy nezmeškáte upozornenie.

Krok 9: Odstránenie senzora

Vyberte senzor, až to bude bezpečné. Zdvihnutím páky otvoríte dvierka Moocall a zatlačením pracky na rače úplne doľava uvoľníte popruh.



Krok 10: Vyčistite snímač

Jemne čistite suchou kefou alebo vlhkou handričkou. Po každom otelení senzor vždy vyčistite.



POZNÁMKA: NEPONORUJTE senzor do vody alebo iných kvapalín!
VAROVANIE! NEČISTITE SNÍMAČ BEZ NASADENÉHO KRYTU NAPÁJANIA!

Krok 11: Resetovanie snímača

Po otelení stlačte tlačidlo na 1 sekundu pre resetovanie. Svetlo sa zmení z neprerušovaného červeného na blikajúce modro a senzor je teraz pripravený na umiestnenie na ďalšiu kravu. Pokiaľ nie je senzor resetovaný ručne, po 1 hodine sa automaticky resetuje.

Ak chcete senzor vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 10 sekúnd.



Prídavný senzor – Informácie

DÔLEŽITÉ!

Moocall Sensor je navrhnutý tak, aby poskytoval cennú pomoc farmárom v období telenia. Nie je zaručené, že bude predvídať každé otelenie!

Počas obdobia telenia by mala byť zachovaná primeraná úroveň priameho alebo kamerového dohľadu.

Na zabezpečenie najlepšej úžitkovosti sa odporúča, aby poľnohospodári využívali svoje vlastné skúsenosti a znalosti o svojom stáde. Napríklad, ak je senzor namontovaný na veľmi dospelú kravu, ktorá porodí predčasne, alebo dojnica pred otelením nepociťuje normálnu úroveň stresu alebo pôrodných bolestí, nemusí senzor odoslať upozornenie na mobilný telefón farmára.

Utiahnite prosím senzor iba do bodu, kde je bezpečný a nespadne z chvosta, pokiaľ je senzor príliš utiahnutý, môže to zvierat'u spôsobiť nepohodlie a to môže viesť k falošným textovým upozoreniam.

Ak sa krava neotelí do štyroch dní od pripojenia senzora k chvostu, odoberte jednotku z chvosta na 3-4 hodiny, než ju znovu nasadíte, aby ste predišli nepohodlie zvierat'a.

Snímače otelenia Moocall sú schopné detekovať skoré pôrodné tiesne, aj keď to nemusí byť pre farmárov viditeľné. Po obdržaní upozornenia pravidelne kontrolujte a dohliadajte na svoju kravu.

Správanie zvierat sa veľmi líši od kravy ku krave. Očakáva sa, že senzory Moocall predpovedajú veľmi vysoké percento otelenia (cca 95%). **Spoločnosť Moocall Ltd nepreberá zodpovednosť za zvieratá stratené alebo zranené v dôsledku krátkeho alebo žiadneho textového upozornenia.**

Snímač telenia Moocall je určený iba pre dobytok. **Prosím, nepoužívajte senzor na iné zvieratá.**

Údržba batérie

Ak chcete zachovať životnosť batérie a dlhú životnosť senzora, po období otelenia batériu pred odložením senzora nabite.

POZNÁMKA: PRED ULOŽENÍM SNÍMAČA PLNE NABIJTE BATÉRIU

Komponenty senzora

Nabíjačka



Zástrčka AU/NZ



Zástrčka US Zástrčka EU



Nabíjací kábel



Nabíjací uzáver



Popruh



Matica a skrutka



Nastaviteľný popruh



Gumová vložka



Kryt



Moje Moocall senzory telenie

Tu si zapíšete čísla MC a IMEI vašich senzorov Moocall:

MC-číslo: IMEI číslo:

Prihlásenie k MyMoocall

Tu si zapíšete svoje prihlasovacie údaje MyMoocall:

Užívateľské meno:

Heslo:

www.mymoocall.com

Kontaktujte Moocall

Náš priateľský a skúsený personál zákazníckeho servisu vždy rád zodpovie všetky otázky, ktoré môžete mať ohľadom Moocall.

Môžete nás kontaktovať mnohými rôznymi spôsobmi:

Medzinárodný telefón: +353 1 969 6038

E-mailom:

help@moocall.com

Web:

www.moocall.com

Facebook:

www.facebook.com/moocall

Twitter:

www.twitter.com/moocallsensors

Chat je dostupný na www.moocall.com, www.mymoocall.com na našej facebookovej stránke www.facebook.com/moocall av aplikácii Moocall Breedmanager.